

自動腹膜灌流用装置 ホームPDシステム **かぐや**

腹膜透析用治療計画プログラム シェアソース **Sharesource**



Baxter

各種自動機能

自動バッグ識別

使用する全ての透析液バッグの識別マークを自動的にスキャンし、正しい透析液がセットされているかを確認します。間違った透析液をセットした場合は「かぐや」が画面と音声で案内します。
また、透析液チューブの先端は「かぐや」の前のトビラのどの溝にはめ込んでもかまいません。**※1**

自動接続

手で器材のふたやキャップを外す必要がなく、切り離し・接続を自動で行います。**※2**

自動プライミング

プライムセンサー搭載により、カセット内等器材の空気を出して透析液で満たすプライミング操作を自動で行います。**※3**



デザイン

- 使いやすさを追求した人間工学的デザイン
- ライフスタイルにとけこみやすいデザイン
- 小型・軽量

ユーザーインターフェース

- カラータッチパネル搭載
- アニメーション画像と音声による操作案内
- 慣れた方用の手順も選択可能

各種自動機能

自動バッグ識別


使用する全ての透析液バッグの識別マークを自動的にスキャンし、正しい透析液がセットされているかを確認します。間違った透析液をセットした場合は「かぐや」が画面と音声で案内します。
また、透析液チューブの先端は「かぐや」の前のトビラのどの溝にはめ込んでもかまいません。**※1**

自動接続

手で器材のふたやキャップを外す必要がなく、切り離し・接続を自動で行います。**※2**


自動プライミング

プライムセンサー搭載により、カセット内等器材の空気を出して透析液で満たすプライミング操作を自動で行います。**※3**

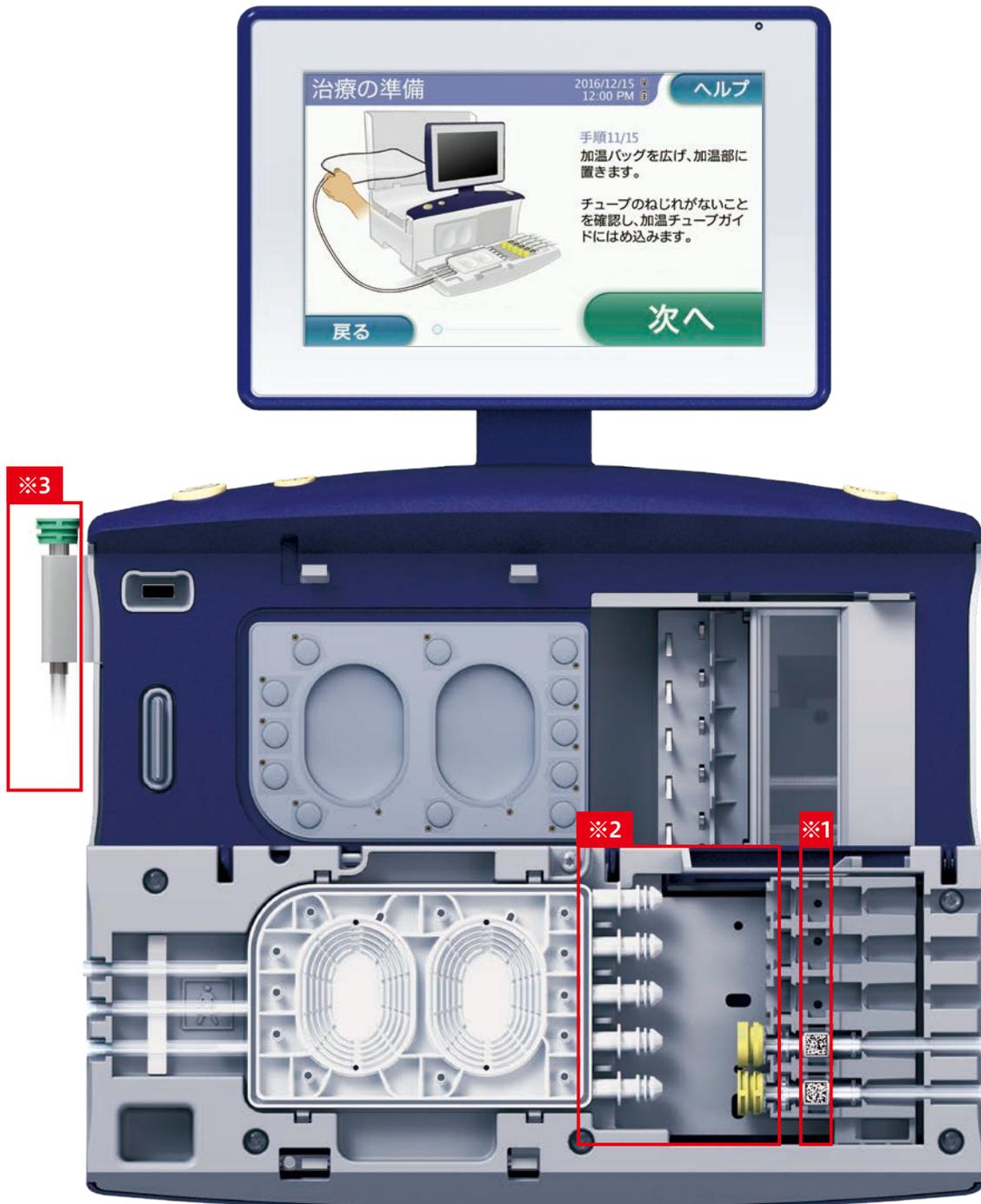

ホームPDシステム かぐや及びシェアソースは、
腹膜透析のインフラとして、タッチコンタミネーション防止、
全自動、軽量・小型化及びインターネット接続をキーワードに
開発されました。


腹膜透析のあたらしい物語へ、ようこそ

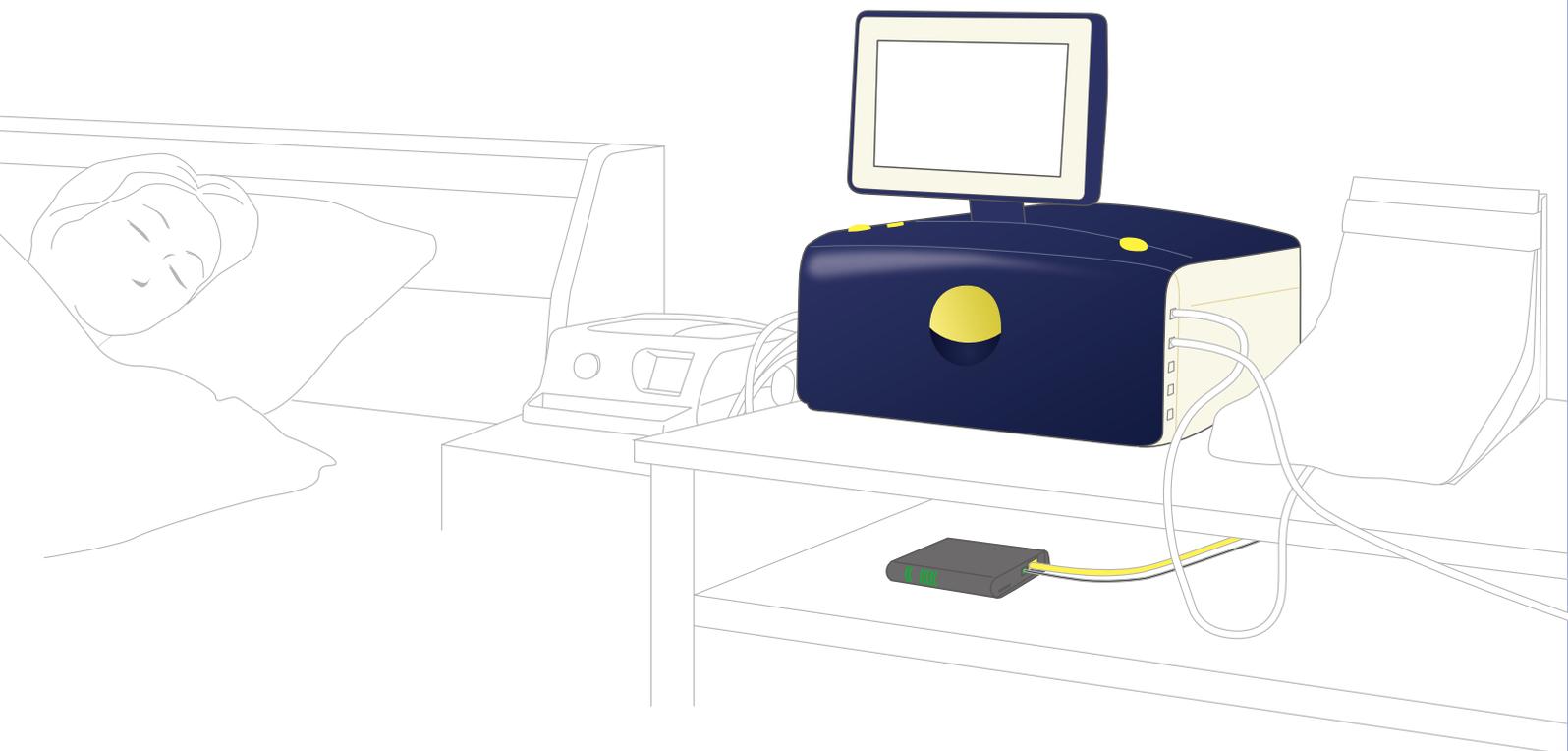



インターネット接続

- 遠隔治療モニタリング
- 遠隔装置設定
- 遠隔情報共有

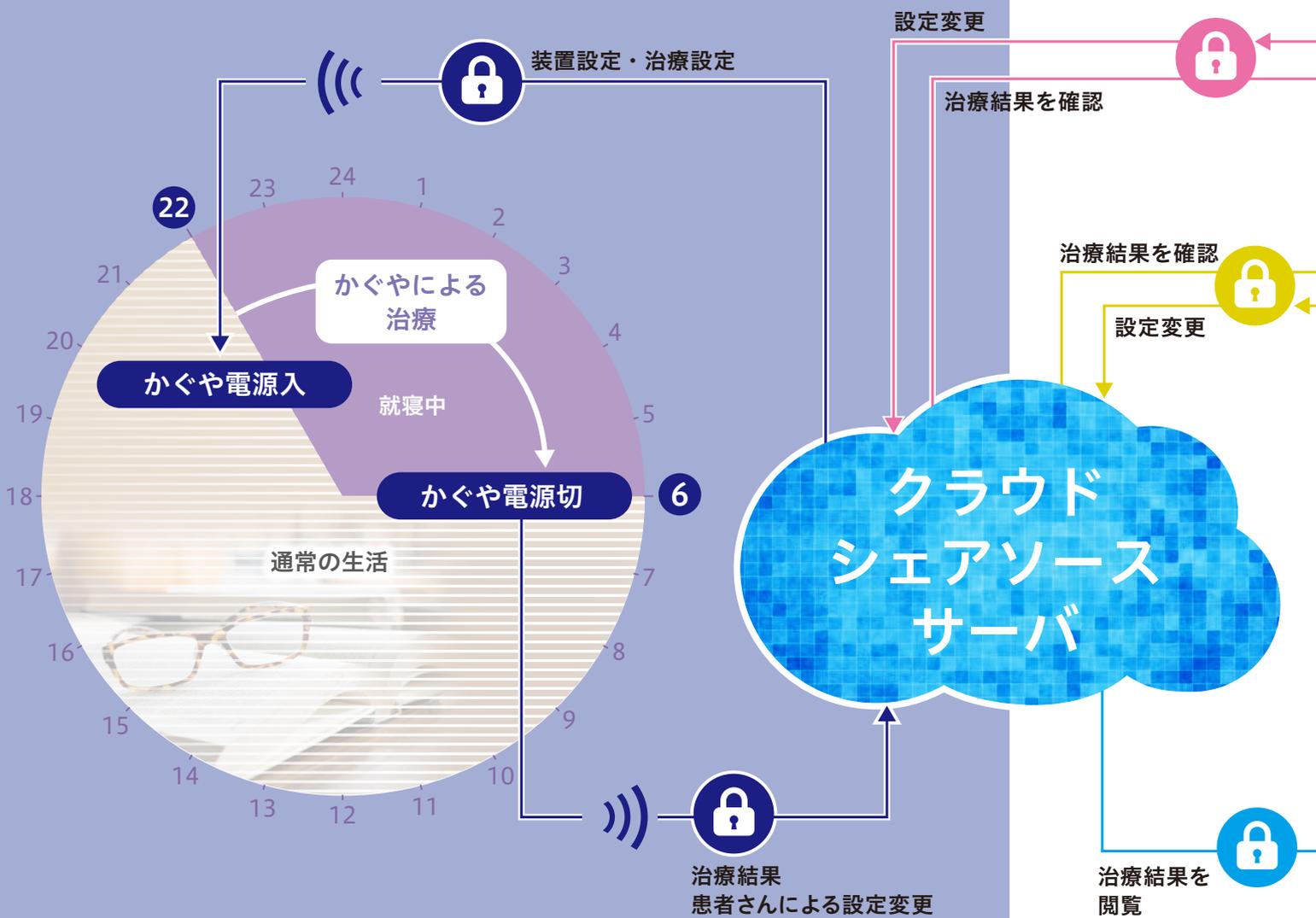

セキュリティ

- 送受信するデータは全て暗号化
- 高い安全性基準に準拠したサーバーを使用



病院でのモニタリング

双方向データ通信が可能であるリモートマネジメントシステム シェアソースの特徴

いつでもどこからでもアクセス可能



A. 医師



B. 医師



1

遠隔モニタリング

- ・ 治療の実際
- ・ 透析成績
- ・ コンプライアンス
- ・ かぐやのトラブル
- ・ 一般状態（患者入力）

2

遠隔治療設定

- ・ 処方設定
- ・ 患者が変更できる項目の設定
- ・ かぐやのシステム設定

3

遠隔情報共有

- ・ 院内他部署
- ・ 他医療機関
- ・ 訪問看護ステーション
- ・ 介護施設
- との連携・情報共有が可能

簡単にわかりやすく実現する機能：例

ダッシュボードとアイコン

過去28日間に治療を受けた患者の一覧をカレンダー式でアイコン表示



患者スナップショット

カレンダー式アイコン表示と、以下の結果をグラフで表示

- 夜間除水量グラフ
- バイタルデータ（体重、血圧等）



装置テンプレート

医療機関毎にかぐやの処方（4つ）、患者設定、システム設定のテンプレートを作成・使用可能

高レベルのデータセキュリティ：例

2ファクタ認証

ログインに必要な認証を二重化することでセキュリティを強化



患者アクセス権

ユーザー（医療スタッフ）毎に患者情報のアクセス権を設定可能



訪問看護師



かぐや

品番	販売名	一般の名称	クラス分類	包装	承認番号
T5C8500	ホームPDシステム かぐや	自動腹膜灌流用装置	クラスIII：高度管理医療機器	1	22800BZX00454000

項目	内容
定格電圧	100 - 127V+10%/-15% 220 - 240V+10%/-15%
最大消費電力	720VA
外形寸法	幅38.0cm×奥行き29.0cm×高さ18.3cm
質量	9.0kg

項目	内容
同梱品	電源コード、取扱説明書、取扱説明書 追補版
付属品	かぐやメモリー、モデム、モデム用アダプタ

シェアソース

品番	販売名	一般の名称	承認番号
5C9400	シェアソース	腹膜透析用治療計画プログラム	22800BZX00345000

つなぐ

品番	販売名	一般の名称	クラス分類	包装	認証番号
ATC4600	つなぐ	腹膜灌流用紫外線照射器	クラスII：管理医療機器	1	22200BZX00606000

項目	内容
定格電圧	100 - 240V
電源入力	100 - 120VA
外形寸法	幅19.5cm×奥行き24.1cm×高さ9.9cm
質量	2.6 kg

項目	内容
同梱品	電源アダプタ 電池ケース 取扱説明書 添付文書 同梱リスト「どこに何が入っているの？」

製造販売元：株式会社メテック 埼玉県川越市芳野台一丁目103番地66 (Tel.049-223-0241 (代))

かぐやの対応製品

品番	販売名	分野名	構成・分類	包装	承認番号	備考
T5C4600	ホームPDシステム かぐやセット	腹膜透析液交換セット	回路・APDセット (落差式・ポンプ式)	10セット	22800BZX00455000	かぐや専用
T5C4476	ホームAPDシステム ゆめセット 排液採取用セット	腹膜透析液交換セット	回路・APDセット (落差式・ポンプ式)	6セット	20400BZY01282000	ゆめ・かぐや共用

品番	販売名	一般の名称	承認番号
5C9400	シェアソース	腹膜透析用治療計画プログラム	22800BZX00345000

品番	販売名	規格	承認番号
ANB0605	エクストラニール腹膜透析液	シングルバッグ・機器専用 1,500mL	22000AMX02453000
ANB0606	エクストラニール腹膜透析液	シングルバッグ・機器専用 2,000mL	22000AMX02453000
ANB3619	レギュニール HCa 1.5 腹膜透析液	シングルバッグ・機器専用 5,000mL	22500AMX01821000
ANB3629	レギュニール HCa 2.5 腹膜透析液	シングルバッグ・機器専用 5,000mL	22500AMX01823000
ANB4619	レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液	シングルバッグ・機器専用 5,000mL	22500AMX01818000
ANB4629	レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液	シングルバッグ・機器専用 5,000mL	22500AMX01819000
ATB3617	レギュニール HCa 1.5 腹膜透析液	シングルバッグ・機器専用 2,500mL	22500AMX01821000
ATB3627	レギュニール HCa 2.5 腹膜透析液	シングルバッグ・機器専用 2,500mL	22500AMX01823000
ATB4617	レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液	シングルバッグ・機器専用 2,500mL	22500AMX01818000
ATB4627	レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液	シングルバッグ・機器専用 2,500mL	22500AMX01819000
ATB3636	レギュニール HCa 4.25 腹膜透析液	シングルバッグ・機器専用 2,000mL	22500AMX01822000
ATB4636	レギュニール LCa 4.25 腹膜透析液	シングルバッグ・機器専用 2,000mL	22500AMX01820000

Baxter、かぐや、シェアソース、つなぐ、レギュニール及びエクストラニールはバクスターインターナショナルインクの登録商標です

製造販売元

Baxter

バクスター株式会社
東京都中央区晴海1丁目8番10号
トリトンスクエア オフィスタワー-X9階

www.baxter.co.jp

JPMG2421700021
1810